




Notice d'utilisation du garrot tourniquet

Instructions de pose

Par secouriste



En auto-assistance

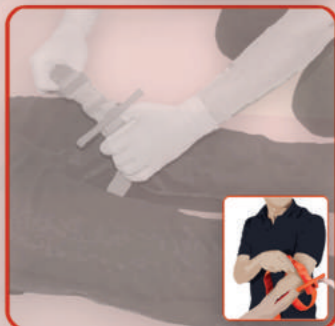

1

2

3

4

5

6

7

Appliquer à une main de distance au dessus de la plaie (*)

Découper le vêtement si besoin

Tirer très fortement sur la sangle autour du membre

La rabattre sur elle-même grâce à la bande Velcro™

Si le serrage est correct, on ne doit plus pouvoir glisser les doigts sous le garrot

Sinon serrer davantage

Tourner la barre jusqu'à l'arrêt complet du saignement

2 à 3 tours peuvent être nécessaires

Verrouiller la barre dans son logement

Si le saignement n'est pas contrôlé, ajouter un second garrot en amont du premier

Sécuriser la barre dans le logement de verrouillage à l'aide du Velcro™ prévu à cet effet

Noter l'heure de pose sur le Velcro™

(*) Dans l'impossibilité de déterminer précisément l'origine du saignement, appliquez le garrot sur les vêtements aussi haut que possible.

Le garrot ne doit pas être positionné sur des objets durs contenus dans les vêtements. Dès que possible, le membre doit être réévalué et le garrot repositionné à même la peau, 5 à 7 cm au-dessus de la plaie.